

# ORALMEDIC®

**Aft ağrısını anında giderir!**

**ORALMEDIC®** aft ağrısı ve rahatsızlığını tek kullanımda ve anında durdurur. Doğal iyileşme için gereken en uygun şartları sağlamak amacıyla yara üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak etki eder.

## Kullanma Talimatı:

### Önemli-Lütfen dikkatle okuyunuz

- 1 Pamuklu kurulama çubuğu ile yaralı bölgeyi kurulaşın
- 2 Aplikatörü renkli kısmı yukarı gelecek şekilde tutun. Renkli halkayı kırılana kadar bir tarafa doğru hafifçe eğin. **ORALMEDIC®** ters uca doğru akacaktır
- 3 Yaranın tamamını örtecek şekilde yara üzerine 5 saniye uygulayın. İşlemden hemen sonra kısa süreli sızlama gerçekleşir
- 4 Ağızınızı bol suyla çalkalayın ve tükürün.



**Not:** Her aft tedavisi için genellikle tek kullanım yeterlidir. Ağız çalkalandıktan hemen sonra ağrı devam ediyorsa aftın tamamen örtülmediğinin işaretidir. Bu durumda uygulamayı yeni bir aplikatörle tekrarlayın ve ağızınızı tekrar çalkalayın. Tek bir yaraya birden fazla uygulamayın. Eğer ağrı devam ediyorsa, doktorunuza danışın. **ORALMEDIC®**, uçuk tedavisinde kullanılmaz.

## Rengini bozabileceği veya tahriş edebileceği için giysilerinize bulaştırmayın.

### Önemli güvenlik bilgileri:

**Sülfür içeren maddelere allerjiniz varsa kullanmayın.** Hamilelerde veya 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz. Göze temastan kaçınınız. Göze temas ettirilirse, varsa hemen lenslerinizi çıkarınız, gözlerinizi 15 dakika suyla yıkayınız ve hemen doktora başvurun. **ORALMEDIC®** sadece ağız mukozasında lokal kullanım amaçlıdır. Aftın içinde ve etrafında oluşan beyaz tabaka, etkili bir tedavinin göstergesidir. Kullanım sırasında lokal tahrişe veya hafif kabarıklığa sebep olabilir. Aşırı tahriş gerçekleşirse, bol suyla ağızınızı çalkalayınız. Durum devam ederse, doktor veya diş hekiminize başvurun. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

Oda sıcaklığında saklayınız.



**İçindekiler:** HybenX (Hydroxybenzenesulfonic asit, Hydromethoxybenzenesulfonic asit, Sülfürik asit, Su, FD&C Red 40.

**Ambalaj şekli:** Herbiri 0.2ml HybenX solüsyon içeren 3 tek kullanımlık aplikatör. 3 kurulama çubuğu.



© Epien Medical Inc, St Paul, MN55110, A.B.D. www.epien.com  
HybenX® Epien Medical, Inc'nın tescilli markasıdır.

**İthalatçı:** Casel Ecz.Cahit Selimoğlu İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Nadide S. No.5 34173-Merter/İstanbul  
www.casel.com Tel: (0212) 483 18 12



Interface International Consultancy Ltd, York, YO42 1YQ